

VENOTEKS®

T H E R A P Y

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Клинически доказанный противоэмболический эффект за счет снижения риска развития тромбоза глубоких вен.
- Трикотаж легко надевать и снимать, нескользящая резинка на силиконовой основе позволяет чулкам постоянно находиться в правильном положении на ноге.
- Ткань не образует складок, ее пористая структура позволяет коже дышать, гипоаллергенность обеспечивается использованием технологий производства изделий без латекса и хлорсодержащих компонентов.
- Открытый носок изделия предотвращает возникновение грибковой инфекции, обеспечивает возможность контроля за состоянием кожных покровов и ногтевого ложа при проведении операции, позволяет осуществлять уход за кожей пальцев ног у лежачих больных.
- Цветовая кодировка носочной части изделия способствует быстрому и правильному подбору нужного размера.


ПРАВИЛА ПОДБОРА РАЗМЕРА VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов, чулок и колгот руководствуйтесь приведенными здесь таблицами.

Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах.

- T** – окружность талии
H – окружность бедер
g – окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)
d – окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)
c – окружность икры
b – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)
a – размер стопы (обуви)
A-D – длина от уровня d до пятки
A-G – длина от уровня g до пятки

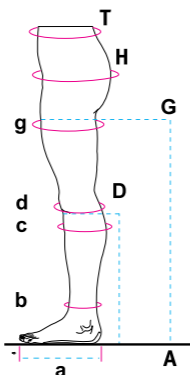

Противоэмболические гольфы, чулки и чулки с поясом, арт.: 400, 401, 402 (размеры в см)

Измерение	Для всех изделий группы		Чулки, арт. 401 и 402		Гольфы, арт. 400	Цветокodировка размера
	Окружность лодыжки	Окружность икры	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Длина от пола до уровня g	Длина от пола до окружности d (окружность под коленной чашечкой)	
Размер	b	c	g	A-G	A-D (для гольфов)	
S	17–22	32–38	44,5–63,5	74–79	до 41	желтый
M	20–24	33–44	53–71	74–79	до 43	белый
L	23–28	37–46	61–80	74–79	до 46	синий
XL	26–32	45–50	70–84	74–79	до 48	зеленый

ПРАВИЛА УХОДА

- Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY рекомендуется ежедневно стирать вручную или подвергать стерилизации методом холодного автоклавирования.
- Температура воды не должна превышать 70°C. В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные средства.
- После стирки изделие нужно хорошо прополоскать в теплой воде, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить в прохладном месте на сухом полотенце.
- Силиконовые полоски резинки-фиксатора (если они предусмотрены в изделии) нужно беречь от попадания воды. Они будут хорошо прилипать к коже, если их протирать хлопковой тканью, смоченной обычным спиртом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- VENOTEKS THERAPY нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.
- Недопустимо использование стиральных порошков, химических растворителей и пятновыводителей.
- Стирка и выжимание изделий в стиральных машинах любого типа запрещены.
- Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.



ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY — современное и эффективное средство для профилактики образования венозных тромбов и возникновения тромбозов (закупорки) артериальных сосудов внутренних органов.

Применение госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY обеспечивает сужение просвета вен, восстановление работы клапанов вен нижних конечностей, ускорение венозного кровотока по направлению к сердцу за счет градуированного давления (компрессии) 18–21 мм рт. ст. на мягкие ткани и стенки вен ног. Градуированная компрессия — физиологически распределенное давление по ноге, максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается компьютером при изготовлении трикотажа VENOTEKS THERAPY.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Роды и послеродовой период в роддоме.
- Все виды амбулаторных и стационарных оперативных вмешательств.
- Пребывание больного в отделении интенсивной терапии и реанимации.
- Длительная неподвижность больного на постельном режиме (состояние после инсультов, инфарктов, ожогов, переломов шейки бедра и других травм).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компрессионный трикотаж следует применять с разрешения лечащего врача в следующих случаях: дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (энтерит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнутие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, в т.ч. рожистое воспаление, инфицированные трофические язвы, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

Изготовитель

Elastic Therapy, Inc. (Эластик Терапи, Инк.) 718, Индастриал Парк Авеню Эшборо, 27204, штат Северная Каролина, США.

Сертификат качества ISO 9001-2008

Импортер

000 «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Для корреспонденции

Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Сертификат соответствия № РОСС US.ИМ24.В04949 от 03.11.2010 г.

Выдан ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ».


РУ № ФСЗ 2010/08201 от 01.11.2010 г.

Выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

VENOTEKS®

T H E R A P Y

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

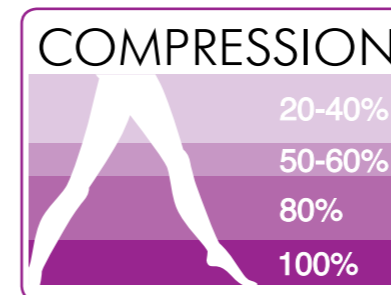

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На компрессионные свойства госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY для нижних конечностей составляет 30 дней при ежедневной стирке изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компрессионное изделие, инструкция.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



ваша победа над варикозом

VENOTEKS®

T H E R A P Y

Медицинские компрессионные противоэмболические чулки
18 - 21
 мм рт. ст.

hospital
 antiembolism

Арт.: TVHAE1-N6_08/12

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки. Индивидуальные параметры покупателя

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

Дата покупки

Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям вам необходимо предоставить по месту покупки:
 1) изделие в чистом виде;
 2) оригинал кассового чека;
 3) данную упаковку изделия.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY нужно надевать перед операцией или родами и использовать в течение всего времени пребывания в стационаре, если врач не рекомендовал иной режим применения трикотажа. Надевать компрессионный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения образования отеков. Пациентам, находящимся на длительном постельном режиме, госпитальный трикотаж необходимо использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ




- Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию чулок.
- Наденьте на ступню шелковый носочек (в моделях с открытым носком).
- Выверните чулок наизнанку до пятки.

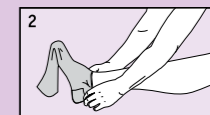

- Осторожно натяните чулок на ступню и убедитесь, что пятка чулка правильно расположена на ноге.

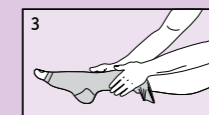

- Натягивайте чулок разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть чулок с усилием за верхний край.

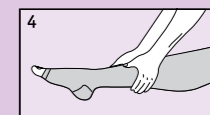

- Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине чулка.
- Если Вы надеваете чулки с поясом, натягивайте их далее на бедра.
- Вытяните (используется в моделях с открытым носком) шелковый носочек.

Обратите внимание!

- Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить чулки, поэтому, используя медицинские компрессионные изделия, нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
- Перед надеванием и стиркой медицинских чулок нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках, которые могут повредить изделие.
- Рекомендуется надевать чулки в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
- Для надевания изделий с открытым носком используйте специальный шелковый носочек.
- Для того чтобы чулки правильно «сидели» на ноге, следует сначала надеть пятку, а потом уже все изделие.

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ VENOTEKS THERAPY

- Удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки.
- Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе.
- Сначала снимите пятку и далее все изделие.