



Orlett®
вернет радость движения

Medical Line

Инструкция по применению ортопедических изделий



**Бандажи на брюшную стенку
(стомические)**

AB-309(S), AB-412(S)



Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандажи на брюшную стенку (стомические) Orlett обеспечивают легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки, фиксируют положение калоприемника/дренажных приспособлений, предотвращая их смещение. Равномерное компрессионное воздействие бандажей способствует улучшению кровообращения мышц и кожи передней брюшной стенки. Применение бандажей предотвращает возникновение грыж в области стомы/послеоперационного рубца за счет защиты и разгрузки соединительно-тканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки. Модель Orlett, арт. АВ-412(S) отличается от модели АВ-309(S) высотой. Высота модели Orlett, арт. АВ-309(S) – 23 см, арт. АВ-412(S) – 30 см.

Показания к применению:

- реабилитация больных со стомой в послеоперационный период;
- реабилитация больных в послеоперационном периоде, при использовании дренажных приспособлений;
- профилактика образования грыж в области стомы;
- поддержка передней брюшной стенки у больных со стомой.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- локальные (в области применения бандажа) дерматиты и гнойничковые инфекции кожи;
- диафрагмальные грыжи;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

Применение бандажа Orlett на брюшную стенку (стомического), арт.: АВ-309(S), АВ-412(S)

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. АВ-309(S) и бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический) арт. АВ-412(S) состоят из:

1. Эластичного пояса с застежками-липучками «Велкро» (рис. 1).
2. Поддерживающего элемента с застежками-липучками «Велкро», фиксирующего положение калоприемника/дренажа (рис. 2).
3. Системы против скручивания бандажа – четырех съемных спиральных ребер жесткости (рис. 3).



рис.1



рис.2



рис.3

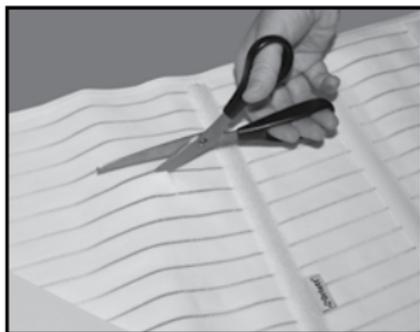


рис.4

Порядок надевания:

1. Подготовка бандажа:

- a. Снимите поддерживающий элемент.
- b. Примерьте бандаж Orlett и определите место вывода калоприемника/дренажа наружу.
- c. С помощью острого предмета (ножниц или перочинного ножика) сделайте разрез нитей вдоль прозрачной части ткани бандажа (рис. 4). Разрез должен находиться в передней части бандажа, в области вывода калоприемника/дренажа и иметь длину разреза, позволяющую вывести наружу емкость калоприемника или элементы дренажа. При выполнении разреза соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

2. Порядок надевания бандажа.

Внимание! Бандажи Orlett, арт. АВ-309(S), АВ-412(S) рекомендуется надевать в положении лежа перед подъемом с постели.

- a. Расположите бандаж Orlett так, чтобы система против скручивания бандажа находилась сзади.
- b. Застегните бандаж с помощью застежки-липучки «Велкро» так, чтобы разрез оказался в области стомы.
- c. Через разрез в ткани бандажа выведите емкость калоприемника/дренаж наружу.
- d. Зафиксируйте положение калоприемника/дренажа поддерживающим элементом с помощью застежек-липучек «Велкро».

Внимание! Не следует затягивать бандаж слишком сильно во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила подбора:

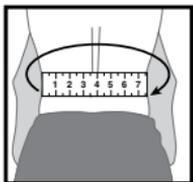


рис.5

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность талии (рис. 5).

Согласно полученным результатам подбирается необходимая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров:

Бандаж Orlett, арт. АВ-309(S)	Окружность талии (см)
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135

Бандаж Orlett, арт. АВ-412(S)	Окружность талии (см)
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135

ВНИМАНИЕ!

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделия:

Бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. АВ-309(S) и бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. АВ-412(S):

35% полиэстер, 25% нейлон, 15% вискоза, 10% спандекс, 5% пенополиуретан, 5% хлопок, 5% полипропилен.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен.

Возможность использования бандажей дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажей без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажей. Рекомендуется эксплуатация бандажа одним пациентом.

Комплектность:

Бандаж Orlett арт. АВ-309(S): ортопедическое изделие арт. АВ-309(S), инструкция по применению.

Бандаж Orlett арт. АВ-412(S): ортопедическое изделие арт. АВ-412(S), инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.
выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.